

ツカヤマ式にきびマイクロ鑷子

【禁忌・禁止】

1. 製品本来の使用目的と異なる用途での使用はしないこと。
2. 本製品の加工および改造等は絶対に行わないこと。

*【形状、構造および原理等】

1. 材質
ステンレス鋼

2. 形状



3. 原理

ハンドル部を操作して 2 枚の刃を開閉する事により、先端部で組織を挟む、又は掴む事が出来る。先端部の凹み(へこみ)の中心で毛穴をしっかりと捉えて押し出すことにより、毛包部からコメド等を圧出し取り除く。

【使用目的】

本品は、尋常性ざ瘡等の治療において、毛穴に詰まったコメド等を取り除くために使用する。

【使用方法】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌を行う。
2. 傷や曲がり、先端部の損傷などが無いことを確認する。
3. 鑷子の先端を閉じた状態で毛穴に差し込み、優しく開いて毛穴を広げる。
4. 鑷子を返転し、先端屈曲部が開いた状態で軽く押し当てる。
5. 先端部の凹み(へこみ)で毛穴を挟み込み、コメド等を押し出して除去する。
6. 使用後は適切かつ速やかに洗浄を行う。

【使用上の禁忌及び注意】

1. 本品を取扱う際は、重篤な合併症を避けるため、眼窩及び眼窩周囲には使用しないこと。また、口周囲、下顎辺縁部、鼻部での操作はより慎重に取り扱い、先端部等に細心の注意を払うこと。
2. 硬いものに接触させるなど、先端を損傷もしくは変形させると器具の性能が低下し、寿命が著しく短くなる可能性がある。
3. 本品を使用するに当たっては器具及び手技に対する適切な理解が必要なため、手技に習熟した者以外は使用しないこと。
4. 洗浄の際は、目の粗い研磨剤や金属ウール等で本品の表面を磨かないこと。
5. 滅菌の際は器具に負荷を掛けず、先端部が開いた状態で行うこと。

【滅菌方法】

本品は未滅菌品である。使用前に必ず滅菌すること。
滅菌は高圧蒸気滅菌(134℃/5 分)、ガス滅菌を推奨する。

【貯蔵・保管方法】

1. 本品を保管する際は、高温・多湿を避け、塵や埃の無い清潔な場所に保管すること。
2. 水濡れや直射日光は絶対に避けること。

【耐用年数】

2年 (自己認証:当社データによる。)
但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用された場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある。
物理的破損の場合はその限りではない。

**【保守・点検に係る事項】

1. 本品を安全により長くご使用頂くために、使用前・使用后・定期点検を必ず行うこと。
 2. 錆を防ぐため、以下のことを守ること。
 - ① 使用后、速やかに洗浄する。
 - ② 洗浄後、汚れが残った状態での滅菌・消毒は避ける。
 - ③ 洗浄・滅菌に使用する水は、蒸留水または脱塩した水を使用する。
 - ④ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避ける(中性洗剤を使用)。
 - ⑤ 超音波洗浄の際、メーカー指定の適正な洗剤を使用する。
 - ⑥ 洗浄後、速やかに乾燥(湿った状態で放置しない)。
- ※洗浄・消毒時は、方法に適した洗剤や薬剤を選択し、その適正濃度と取り扱い方法を順守する。(濃度に注意し、消毒液等への長時間浸水は行わない。)また、次の薬剤は金属腐食起こす恐れがあるので注意する。(次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンザトコニウ、ポピドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン 等)

【包装】

1 本入り

【製造販売業者等】

製造販売業者:JMR株式会社
〒959-0511
新潟県新潟市西蒲区大原 3061
Tel:0256-77-8808 FAX:0256-77-8809
E-mail: info@jmr-lab.com

製造業者:山崎金属工業株式会社
〒959-1263
新潟県燕市大曲 2570
Tel:0256-64-3141 Fax:0256-64-3145

発売元:株式会社セラヴィ
〒650-0021
兵庫県神戸市中央区三宮町 1 丁目 4-4 木口ビル 5F
Tel:078-391-5852 FAX:078-392-3532
E-mail: info@cestlavie-kobe.jp