

## 口腔内小帯切除補助器具 タングリフト Tongue Lift

### 【警告】

・本品は未滅菌品である。使用前に必ず滅菌すること。

### 【禁忌・禁止】

1. 製品本来の使用目的と異なる用途では使用しないこと。
2. 本品の加工及び改造等は絶対に行わないこと。

### 【形状、構造および原理等】

1. 原材料  
ポリプロピレン
2. 形状、構造



### 3. 原理

舌小帯及び上唇小帯切除の手術に用いる器具であり、先端で舌または上唇を圧迫することにより口腔の視野を確保することや、切除部分の計測をするために用いられる。また、舌の挙上訓練器具として用いる。

### 【使用目的又は効果】

舌及び上唇を移動させて、組織の検査と手術を容易にするために用いる器具である。

### 【操作方法又は使用方法】

1. 本品は未滅菌である。使用前に必ず滅菌すること。
2. 使用後は適切な方法で洗浄を行い保管する。

### 【使用上の注意】

1. 使用前に、本品の汚れ・破損・変形等を点検すること。
2. 使用目的以外の用途で使用しないこと。
3. 洗浄及び再滅菌は【保守・点検に係わる事項】に従い行うこと。

### 【貯蔵・保管方法】

高温、多湿、直射日光を避け、塵や埃の無い清潔な場所に保管すること。

### 【耐用年数】

1年(自己認証:当社データによる。)

但し、指定された使用環境において標準的な頻度で使用され、指定の保守点検をした場合の年数であり、使用状況によっては異なる場合がある。

### 【保守・点検に係わる事項】

1. 本品を安全に、より長く使用するために、使用前・使用后・定期点検を必ず行うこと。
2. 劣化を防ぐため、以下のことを守ること。
  - ① 使用后、速やかに洗浄する。
  - ② 洗浄後、汚れが残った状態での滅菌・消毒は避ける。
  - ③ 洗浄・滅菌に使用する水は、蒸留水または脱塩した水を使用する。
  - ④ 酸やアルカリの強い洗剤の使用は避ける(中性洗剤を使用)。
  - ⑤ 超音波洗浄の際、メーカー指定の適正な洗剤を使用する。
  - ⑥ 洗浄後、湿った状態で放置せず、速やかに乾燥させる。
3. 滅菌を行う場合は、乾燥状態を確認の上行うこと。  
乾燥していないと滅菌不良が発生する可能性がある。  
滅菌方法:EOG滅菌またはオートクレーブ滅菌
4. 再使用の際は不具合がないか必ず確認すること。

### \*【包装】

2個/袋

### 【製造販売業者および製造業者】

製造販売業者:JMR株式会社

〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原 3061

Tel:0256-77-8808 Fax:0256-77-8809

E-mail: info@jmr-lab.com

発売元:株式会社オールウェイズ

〒959-1232 新潟県燕市井土巻 4 丁目 137

Tel:0256-46-8833