

機械器具(40)医療用のこぎり
一般医療機器:手術用のこぎり JMDN:13448001

サージソー SURGESAW

【警告】

・本品は未滅菌品である。使用前に必ず滅菌すること。

【禁忌・禁止】

- ・本品を使用目的と異なる用途では使用しないこと。
- ・本品に劣化や異常が見られた場合には、ただちに本品の使用を中止すること。
- ・本品の加工及び改造は絶対に行わないこと。

【形状・構造および原理等】

1. 原材料

ステンレス

2. 形状、構造

【代表例】



3. 原理

手術器械に装着し、本品を振幅させることにより骨を切削するのこぎりである。

【使用目的又は効果】

本品は形成外科手術の際に骨の切削もしくは切除に用いる手術器具である。専用ハンドピースに接続して使用する。

【使用方法等】

1. 本品は未滅菌品である。使用前に必ず滅菌すること。
134°C/5分の高圧蒸気滅菌条件を推奨する。
2. 本品を適合する手術器械に装着し、本品を振幅させることにより骨を切削する。
3. 使用後は適切な方法で洗浄を行い保管する。

【使用上の注意】

- ・本品を使用するにあたっては、器械と操作に対する適切な理解が必要である。手技に習熟した者以外は使用しないこと。
- ・使用前にキズや変形など使用上支障を生じるような欠点がないことを確認すること。
- ・使用前に本品が手術器械に適切に接続されているか、正常動作するか確認をすること。
- ・本品全般および患者に異常の無いことを常に監視すること。

- ・本品および患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で本品の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
- ・本品に患者が触れることのないよう注意すること
- ・廃棄の際は感染防止に配慮して安全な方法で処分すること。
- ・刃の部分の取扱い及び保管に際しては特に注意して行うこと。
- ・誤った使用法は本品の損傷や思わぬ有害事象を招く恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光を避け、塵や埃の無い清潔な場所に保管すること。
 - ・耐用期間:1年(自己認証:当社データによる。)
- 本品はリユース品であるものの、使用によって刃の消耗が発生する可能性がある。刃の消耗が著しい際は耐用期間未満でも使用を中止し、新しいものと交換を行うこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・使用前、使用後、定期点検を必ず行うこと。
- ・使用後は速やかに洗浄すること。
- ・洗浄後、汚れが残った状態での滅菌・消毒は避けること。
- ・洗浄・滅菌に使用する水は、蒸留水または脱塩した水を使用すること。
- ・汚染除去・洗浄の際、強アルカリ/強酸性洗剤は腐食の原因になるので使用を避け、金属たわし、クレンザー(磨き粉)は表面が損傷する恐れがあるので使用しないこと。
- ・超音波洗浄の際、メーカー指定の適正な洗剤を使用すること。
- ・洗浄後は十分に乾燥させること。

【包装】

1本入り

【製造販売業者および製造業者】

製造販売業者:JMR株式会社

〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原 3061

Tel:0256-77-8808 FAX:0256-77-8809

E-mail: info@jmr-lab.com

製造業者:有限会社エーワン・プリス

〒959-1228 新潟県燕市佐渡 419 番地

Tel:0256-62-4475 FAX:0256-64-4364

発売元:株式会社 KY イメージングテック

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 10-34 井門江坂駅前ビル 7F

Tel:06-6369-7788 FAX:06-6369-7799