

医療用品 03：手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN コード：70976000）

医療用ニトリルグローブ パウダーフリー50 検査・検診用

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：左右兼用タイプ
サイズ：SS / S / M / L
材質：ニトリルゴム 100%

【使用目的、効能又は効果】

手術や歯科を除いた検査、検診、治療行為 及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・水濡れに注意し、直射日光 及び 高温多湿を避けて保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンが発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。熱源、X 線、高温多湿を避けて保管すること。
- ・有効期間： 製造年月より 5 年 [自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

[製造販売業者]
ジェイシード株式会社
〒260-0843
千葉県千葉市中央区末広 4-24-1 ドミール末広 100 号
電話番号 043-308-5094