

医療用品 03: 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 (JMDNコード: 70976000)

医療用プラスチック (PVC) グローブ パウダーフリー50 検査・検診用

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状: 左右兼用タイプ
サイズ: SS/ S /M / L /XL
材質: PVC (ポリ塩化ビニル)

【使用目的、効能又は効果】

手術や歯科を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

小箱取り出し口より本品を丁寧に取り出して装着し使用する。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上使用すること。
- 油類が付いた場合は早めに洗い落としてください。
- 60℃以上の熱に弱いため、熱いものに触れさせないでください。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴が開くことがあるので注意すること。
- この製品は使い捨ての為、使用は1回限りとし、使用後は直ちに破棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

- 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- 蛍光灯下やオゾンを発生する器械、電子機器の周辺等に保管しないこと。熱源、X線、高温多湿を避けて保管すること。
- 有効期間: 製造年月より5年 [自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】

ジェイシード株式会社

〒260-0843

千葉県千葉市中央区末広4-24-1 ドミール末広100号

電話番号 043-308-5094