


機器器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 温熱用パッド JMDN コード：37240010
スパオール

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

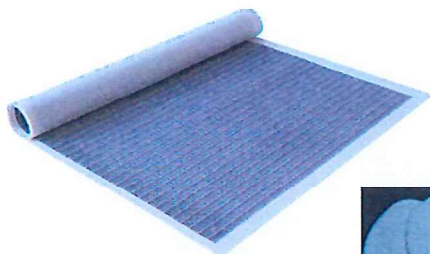

製品の一例を示す。

2. 原理

本製品はシートに練りこんだ備長炭に似た、ケイ素質を多く含んだ炭素素材が遠赤外線を発して温熱効果をもたらす。

3. 原材料

- ・植物炭
- ・ラジウム鉱石粉
- ・帆布（綿、麻又は亜麻等）

【使用目的又は効果】

本製品「スパオール」を着用することで、製品と身体の間に遠赤外線輻射により温熱効果をもたらす、

着用部位の血液循環が促進される。以下の温熱治療を行うパッドとしての機能を持つ。

- ・疲労回復。
- ・血行をよくする。
- ・筋肉の疲れをとる。
- ・筋肉のこりをほぐす。
- ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解。
- ・胃腸の働きを活発にする。

本製品はシートとして床に直接敷いたり、様々な形に裁断し靴・スリッパ・サンダル内にインソールとして使用したり、布にプリントして衣服として使用等する。

【使用方法等】

本製品は下記の用途にそれぞれ適した使用方法がある。

シート：

- ・製品を取り出し、平に伸ばす。
- ・床に直接敷く。
- ・シートの上に立って、又は座って、又は横になっていずれの状態でも使用することができる。

インソール：

- ・靴・スリッパ・サンダル内の形に合わせてシートをカットする。（カット済の製品はカット不要）
- ・カットした製品を靴・スリッパ・サンダル内にセットする。
- ・セットした靴・スリッパ・サンダルを履いて使用する。

衣服として

- ・プリント済の衣服を身体に着用する。
- ・外出中も、就寝中も着用することができる。

【使用上の注意】

- ・使用中に腫れや赤い斑点等、皮膚に異常が起こった場合は使用を中断して下さい。
- ・湿疹やアレルギーのある方は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光の環境を避けて保管する。
- ・有効期限については、製品自体の繊維の劣化が見られない期間である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社シーアンドケイ

住所：東京都葛飾区堀切八丁目 2 4 番 1 2 号

電話番号：03-6662-4314

取扱説明書を必ずご参照ください