


機器器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 温熱用パッド JMDN コード：37240010
リフレソール〜ライト

【形状、構造及び原理等】

1. 構成

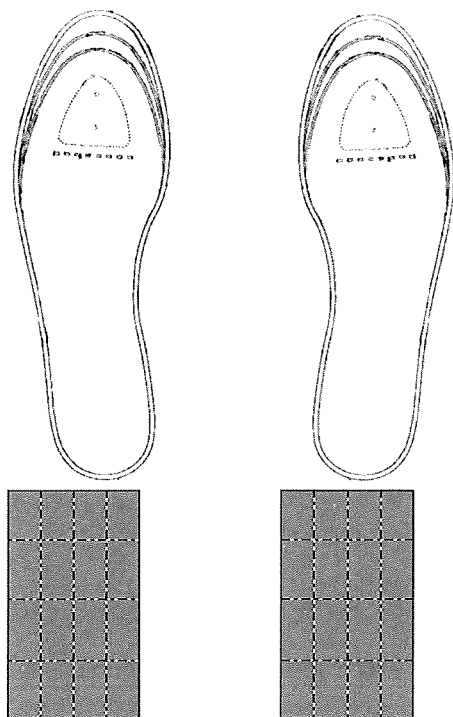

2. 原理

本製品はシートに練りこんだ備長炭に似た、ケイ素質を多く含んだ炭素素材が遠赤外線を発して温熱効果をもたらす。

3. 原材料

- ①温熱シート：
植物炭、ラジウム鉱石粉、帆布（綿、麻又は亜麻等）
- ②インソール本体：
ポリ塩化ビニリデン
- ③銅板：
タフピッチ銅

【使用目的又は効果】

本製品「リフレソール〜ライト」を着用することで、製品と身体の上に遠赤外線輻射により温熱効果をもたらす、着用部位の血液循環が促進される。以下の温熱治療を行うパッドとしての機能を持つ。

- ・疲労回復。
- ・血行をよくする。
- ・筋肉の疲れをとる。
- ・筋肉のこりをほぐす。
- ・神経痛、筋肉痛の痛みの緩解。
- ・胃腸の働きを活発にする。

本製品はインソールとして使用する。

【使用方法等】

- ・温熱シートをインソールに貼り付け、靴・スリッパ・サンダル内にセットする。
- ・セットした靴・スリッパ・サンダルを履いて使用する。

【使用上の注意】

- ・使用中に腫れや赤い斑点等、皮膚に異常が起こった場合は使用を中断して下さい。
- ・湿疹やアレルギーのある方は使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光の環境を避けて保管する。
- ・有効期限については、製品自体の繊維の劣化が見られない期間である。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
名称：株式会社シーアンドケイ
住所：東京都葛飾区堀切八丁目 2 4 番 1 2 号
電話番号：03-6662-4314