


## 添付文書

機械器具 12 理学診療用器具  
一般医療機器 温熱用パッド 37240010 (JMDN コード)

## 【百歳寝具シリーズ】

## 【形状、構造及び原理等】

## 1. 形状・構造

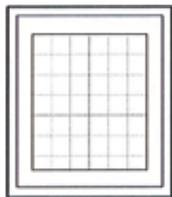

掛布団



敷きパッド

本製品は、寝具として使用する形状である。

寸法は

掛布団：幅 150cm×長さ 210cm

敷きパッド：幅 100cm×長さ 200cm

## 2. 原理

本製品は数種類の鉱石を練りこんだ繊維を使用した寝具型の医療機器である。繊維に練りこまれた鉱石が身体の体温の赤外線輻射作用により温熱効果をもたらすことによって加熱され、温熱パッドとしての機能を果たす。

## 【使用目的又は効果】

鉱石を練りこんだオーガニックコットンを原材料とした本製品を、身体の体温の赤外線輻射作用により温熱効果をもたらす、寝具として使用する。本製品との接触部位に対して温熱治療の効果をもたらす。温熱治療の効果として、以下のがある。

- ・疲労回復。
- ・血行をよくする。
- ・筋肉の疲れをとる。
- ・筋肉のこりをほぐす。
- ・神経痛・筋肉痛の痛みの緩解。
- ・胃腸の働きを活発にする。

## 【使用方法等】

- ・寝具の用途に応じて使用する。
- ・使用する前に身体の体温の赤外線輻射作用によりもたらされた温熱効果で本製品を加熱する。
- ・本製品は継続して使用することにより温熱治療の効果が現れる。使用 10 日間までは効果にばらつきや個人差があるため、継続して 20 日間以上使用することが望ましい。
- ・睡眠時の使用については約 6～8 時間の使用となり代謝の亢進による発汗作用が高まることから、睡眠前後の水分補給を行うこと。
- ・洗濯絵表示の従って洗濯をすること。

## 【使用上の注意】

- ・本製品を洗濯する際、洗濯絵表示に従って行うこと。
- ・使用中に身体に何らかの異常を感じた場合は、すぐに使用を中止すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿の環境を避けて保管すること。
- ・有効期限については、繊維自体の劣化が認められない期間になる。

## 【製造販売業者及び製造業者の指名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社シーアンドケイ

住所：東京都葛飾区堀切八丁目 24 番 12 号

製造業者・販売業者



名称：木村綿業株式会社

住所：新潟県新潟市中央区白山浦 2 丁目 23 番地

電話番号：0800-800-7616

ご使用前に必ずこの文書お読みください。  
お読みになられたあとも大切に保管してください。