

機械器具（25）医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN コード：31776000

【 チェックツール 】


【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用のこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
4. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

口腔内診査又は圧排のために用いる下記歯科用ミラー器具である。
ステンレス製のモデルと、LED ライトがついているモデルがある。
LED ライトがついているモデルは使用時に点灯する。
歯科用スケーラとセットで販売されることがある。

＜外観＞

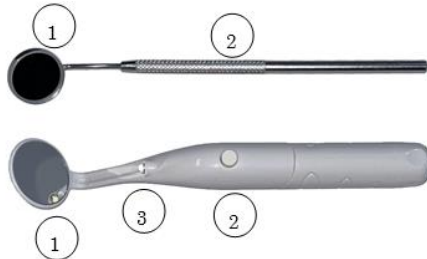

- ①ミラーヘッド
- ②ミラーハンドル
- ③LED ライト

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具である。

【使用方法等】

ケースから取り出し、口腔内にて反射鏡として使用する。

【使用上の注意】

- (1) 本来の目的以外に使用しないこと。
- (2) 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- (3) ミラー面が傷つく恐れがあるので、使用前に、磨き粉、金属ウール、金属ブラシなどで表面を磨かないこと。曇った場合はやわらかい布などで拭くこと。
- (4) 消毒が必要な場合は、薬液を使用すること。（オートクレーブ滅菌不可。）
- (5) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- ・保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社 シーアンドケイ

住所：東京都葛飾区堀切八丁目 2 4 番 1 2 号

製造業者：Wuhan hengguangli Hardware Building
Materials Co., Ltd

（ぶかん ほんぐあんり は一どうえあ び
るでいんぐ まてりあるず かんぱにー
りみてっど）

製造国：中華人民共和国