

衛 01 月経処理用タンポン
一般医療機器 生理用タンポン JMDN コード 35694000
【月経ディスク】

【警告】

長時間使用によっては、トキシックショック症候群（TSS）が発症する可能性があります。

症状：突然の高熱を伴って発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血などがあります。

もし、上記のような症状が発症した場合、直ちに月経カップを取り出して、使用を中止して、すみやかに産婦人科などの専門医に相談してください。

【禁忌・禁止】

- 過去に TSS（トキシックショック症候群）を発症したことがある人は、使用しないでください。ごくまれに、重篤な症状を引き起こす可能性もあります。症状を早期に発見し、適切な治療を受けることが大切です。
- 泌尿器系・婦人科系の疾患を罹患中の人は使用をやめてください。
- 1 回の挿入時間は 8 時間を超えないでください。
- 出産後の最初の月経時の使用は専門医にご相談ください。
- 生理の日以外は利用しないでください。
- 性行為を行う時、必ず入れないでください。

【形状、構造及び原理等】

本品は、月経の経血を収集するための収集用のデスクと、取り出し用の持ち手が一体となって構成されます。



【使用目的又は効果】

本品は、膈内に挿入し経血を回収処理するものです。

【使用方法等】

- 使用前後に鍋に水を沸騰させ、消毒を行います。
- 挿入前に手・指を清潔に洗浄をします。
- ディスクを 8 字になるように握り、ストリングをディスクの前に持ってきます。
- 挿入しやすい姿勢をとり、ディスクを挿入します。
- 取り出す前に手指を洗浄します。
- ディスクが子宮頸管の下に位置するのを感じるまで、ディスクを管の端に向かって押し続けます。
- リムの前面を上方に押し上げ、恥骨の後ろに固定し、シリコンの紐の一部は、膈の入り口の外に残します。
- しっかり洗浄した後利用しない場合、しっかり乾燥させ、付属の巾着などに収納し、通気性のいい場所で保管します。

使用上の注意

準備：使用前後に消毒をしてください。

使用前：両手指を清潔にします。空気穴が塞がっていないか、確認してください。

挿入中：経血の量に関係なく、必ず 8 時間ごとに本品を取り出し洗浄し、消毒してください。

取出し時：万一取り出せなくなった時は、すぐに産婦人科などで取り出してもらってください。

【保管方法及び有効期間等】

- 完全に乾かし、保管してください。
- ビニール袋や密閉容器に保管しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社 シーアンドケイ

住所：東京都葛飾区堀切八丁目 2 4 番 1 2 号

製造業者：Wuhan hengguangli Hardware Building Materials Co., Ltd

（ぶかん ほんぐあんり は一どうえあ びるでいんぐ まてりあるず かんぱにー りみてっど）

製造国：中華人民共和国