

【別紙 9】

2023年10月（第1版）

製造届出番号：13B2X10479302031

機械器具(25) 医療用鏡

一般医療機器 歯鏡 JMDNコード：31776000

歯鏡 LEDライト ME100

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 注意事項を厳守の上、使用すること。
3. 万一本品に異常・劣化等を発見した場合は、使用しないこと。
4. 本体の改造や形状変更などはしないこと。

【形状・構造及び原理等】

口腔内診査又は圧排のために用いるミラーヘッド及びハンドルからなる歯科用器具です。

LEDランプがついており、使用時に点灯します。



・寸法/重量

全長	直径	重量
15.5cm	25mm	11.5g

【使用目的又は効果】

本品は、口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具です。

【使用方法等】

- 1)本品を使用する前に必要に応じて、洗浄・消毒等を行ない清潔にしてください。
- 2)ケースから取り出し、LEDランプを点灯し口腔内を反射鏡として使
用します。
- 3)使用後、LEDランプを消灯しケースに収納してください。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光や高温多湿を避け風通しが良く、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

保管期間：1年

【使用上の注意】

1. 長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。
2. 使用前に汚れ、破損等を点検してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町1-1-1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)

取扱説明書等を必ずご参照下さい。