

2025年7月（第1版）

製造届出番号：13B2X10479302044

医療用品(12) 理学診療用器具

一般医療機器 弾性ストッキング JMDN コード：31724000

着圧ソックス ME015

【警告】

- ・重度の血行障害がある方は使用しないでください。糖尿病、深部静脈血栓症、血行障害、うっ血性心不全、炎症性疾患、装着部位の神経障害などで治療を受けている方は着用前に医師にご相談ください。[症状が悪化するおそれがある。]
- ・妊娠中もしくはその可能性のある方、授乳中の方は使用しないでください。[胎児及び乳児に悪影響があるおそれがある。]

【禁忌・禁止】

- 1)重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の方<圧迫により症状を悪化させる危険性が高い為>
- 2)感染性静脈炎の方<菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがある為>
- 3)極度の脚変形を有する方 <適切な圧迫力が得られない為>

1.形状・構造

ハイソックスタイプ(つま先あり)且つ円柱状（又は筒様）をした形状である。装着部に編み上げられた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造（設計）となっている。



取扱説明書等を必ずご参照下さい。

下表に示す通り、S、M、L、XLとXXL5つのサイズがある。

測定部位	サイズ cm	S	M	L	XL	XXL
	B	18-22	23-25	26-28	29-32	30-34
A	24-28	29-31	32-34	35-37	37-39	
C	30-34	33-37	36-40	38-43	40-44	
D	29-33	32-36	35-39	39-44	41-45	
体重	45kg以下	45-55kg	55-62.5kg	62.5-75kg	75kg	

圧迫圧：

	足首	ふくらはぎ
圧迫力	26hPa(20mmHg)	20hPa(15mmHg)

2. 原理

本品は、足首の圧迫力が最も高く、上にいくほど圧迫力が低くなる漸減的圧迫力になっており、静脈血を心臓方向へと還流しやすくすることにより、静脈血のうっ滞を軽減する。

【使用目的又は効果】

浮腫を改善し、血液とリンパ液の流れを促進し、脚部をサポートする。脚部の静脈内圧を低下させ、静脈血液の流れを促進し、つらいむくみの改善を行う。

【使用方法等】

装着前（サイズの決定）

各測定必要所をすべて測定し、適切なサイズを選択する。5つのサイズにまたがる場合は、足首のサイズがサイズ表の中央値に近いサイズを選択する。

装着時

- ①ソックスをたぐりよせて、ゆっくりとつま先を先端まで入れる。
- ②ゆっくりとふくらはぎの上部まで引き上げる。
- ③両手の親指を内側に入れて、少しずつ均等に引き上げる。
- ④しわができないように、少しずつ均等に膝下まで引き上げる。

【使用上の注意】

- ・ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態にある場合は、注意して使用してください。＜潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性がある＞
- ・本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。＜動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがある為＞

【保管方法及び有効期間等】

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で保管してください。
 - ・製品の変形を防ぐために、ねじれた状態での使用や保管はしないでください。
 - ・清潔な場所に保管してください。
- 保管期限：1年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)