

着圧レギンス ME141

【警告】

次の疾患と診断された方は、使用前に医師に相談すること。

- ・急性期の深部静脈血栓症＜肺血栓塞栓症を起こす恐れがあるため＞。
- ・動脈血行障害、うっ血性心不全及び下肢に炎症性疾患、化膿性疾患、急性創傷のある方＜圧迫により症状を悪化させる恐れがあるため＞。

【禁忌・禁止】

- ・重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の方＜圧迫により症状を悪化させる危険性が高い為＞
- ・感染性静脈炎の方＜菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがある為＞
- ・極度の脚変形を有する方＜適切な圧迫力が得られない為＞

1.形状・構造・材質

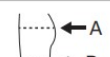
ハイソックスタイプ且つ円柱状（又は筒様）をした形状である。装着部に編み上げられた糸の弾力により同心性の圧迫力を加えるとともに、末梢部から中枢に向かって圧迫力が漸減する構造（設計）となっている。



材質：ナイロン含量：80%±5%

スパandex含量：20%±5%

下表に示す通り、S、M、L、XLとXXL5つのサイズがある。

	<div>サイズ 測定部位</div>	S	M	L	XL	XXL
		A	80-88	85-93	90-98	95-103
	B	42-49	48-55	54-61	60-67	66-73
	C	28-34	32-38	36-42	40-48	44-52
	D	17-21	19-23	21-25	24-28	26-30
	身長(cm)	145-155	150-160	155-165	160-170	165-175

圧迫力ガイド：

	D	C	B	A
圧迫力	19～27hPa	14～22hPa	8～16hPa	3～11hPa

2. 原理

本品は、足首の圧迫力が最も高く、上にいくほど圧迫力が低くなる漸減的圧迫力になっており、静脈血を心臓方向へと還流しやすくすることにより、静脈血のうっ滞を軽減する。

【使用目的又は効果】

浮腫を改善し、血液とリンパ液の流れを促進し、脚部をサポートする。脚部の静脈内圧を低下させ、静脈血液の流れを促進し、つらいむくみの改善を行う。

【使用方法等】

装着前（サイズの決定）

各測定必要所をすべて測定し、適切なサイズを選択する。両方のサイズに該当する場合は、A（臀囲）のそれぞれの中央値に近いサイズを選ぶ。

装着時

- ①本品をゆっくりと足首までたぐりよせる。
- ②レギンスのかかと部分と、ご自身のかかとがぴたり合うように、位置を調整する。
- ③足首から腰までゆっくりと引き上げていく。
- ④最後に全体にシワやずれがないように軽く撫でて整え、フィット感を確認する。

【使用上の注意】

- ・ギプス、外傷等により装着部位が長時間不動状態になる場合には、注意して使用してください。＜潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性がある＞
- ・本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ発疹、かぶれ等の異常及びその他装着前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。＜動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがある為＞

【保管方法及び有効期間等】

- ・火気のそばや高温多湿や直射日光を避け、水濡れに注意し、清潔な場所で保管してください。
- ・製品の変形を防ぐために、ねじれた状態での使用や保管はしないでください。
- ・清潔な場所に保管してください。
- ・保管期限：1年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町 1 1 1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)