

2024 年 4 月 (第 1 版)

届出番号：28B3X10035000003

医 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN：70976000

検査検診用ニトリル・ライトパープル MD890C

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

主材料：合成ゴム(ニトリルゴム)

サイズ、寸法：

単位：cm

サイズ	XS	S	M	L
全長	23	23	23	23
手のひらまわり	15	17	19.5	21.5

未滅菌の使い捨て非天然ゴム製検査・検診用手袋。パウダーフリー(粉なし)タイプ。左右兼用。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含まない。合格品質水準を定め、製造ロット単位で抜取検査を実施。

【使用目的】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

ミシン目に沿って切り取り、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

(1) 使用注意 (次の患者には慎重に適用すること)

患者及び使用者の体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがある。異常を感じたら使用を中止し、適切な処置を施すこと。

(2) 重要な基本的注意

- 複数の患者に使用しないこと。
- 本品は検査・検診用のため、手術には使用しないこと。
- 使用前には、手袋及び包装箱を必ず確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 使用中に破損が認められた場合には、使用を中止すること。
- 破損の原因となるため、爪先・刃物や尖ったもの等

で傷をつけないよう注意すること。

6. 医療従事者以外が触れないように保管・管理すること。

7. 手袋を廃棄する際は感染防止に留意し、関係法令に従い適切に処分すること。

(3) 相互作用 (他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

併用注意 (併用に注意すること)

薬品によっては劣化、浸透、透過する可能性があるため、使用前に確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿、X線、蛍光灯、紫外線、オゾンを避けて保管すること。

2. 有効期間

製造後 3 年 [自己認証 (当社データ) による]

有効期間は包装箱に記載する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

ショーワグローブ株式会社

〒670-0802 兵庫県姫路市砥堀 565

電話：0120-641245 (9:00~17:00 土日祝日を除く)

WEB：www.showaglove.co.jp