

2026年3月作成

(第1版) 医03 手術用手袋および指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JNDN:70976000

**シンコーレインボーソフトタッチ (ニトリルグローブ)**

再使用禁止

Shinko Rainbow Soft touch (Nitrile Glove)

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

本品は 合成ゴム (アクリロニトリルブタジエンゴム) を  
主材料とし、滑剤 (パウダー) の付いていない未滅菌の  
使い捨て 形式の手袋である。

サイズ	XS	S	M	L	XL
全 長	240	240	240	240	240
掌の幅	75	85	95	105	115

※許容誤差±5mm

**【使用目的又は効果等】**

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を  
取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用  
する。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：神光株式会社  
住所：東京都港区芝3丁目3-14-3階  
電話番号：03-5427-6108

**【使用方法等】**

取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

**【使用上の注意】**

(重要な基本的注意) ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた  
場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては  
慎重を期すこと。

- ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがある  
ので確認の上使用すること。(不具合・有害事象)
- ・その他の不具合 (穴、浸透、膨潤・その他の有害事象 かゆみ、  
かぶれ、発疹)

**【保管方法及び有効期間等】**

(保管の条件)

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿、蛍光灯等の紫外線を避け  
室温で保管すること。
- ・オゾンを発生する機器の周辺等を避けできるだけ箱包装のまま保管すること。

(有効期間) ・包装材に記載の通り。