

医療用品 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN コード 70976000）

CGMメディカル ニトリルグローブ

再 使 用 禁 止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 概要


本製品は、検査・検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する非天然ゴムの使い捨てのグローブである。
寸法の相違によってS、M、Lの3種類の型式を有する

2. 形状及び寸法

Sサイズ 全長235mm 手囲い175mm 中指長さ77mm

Mサイズ 全長240mm 手囲い180mm 中指長さ82mm

Lサイズ 全長245mm 手囲い185mm 中指長さ87mm

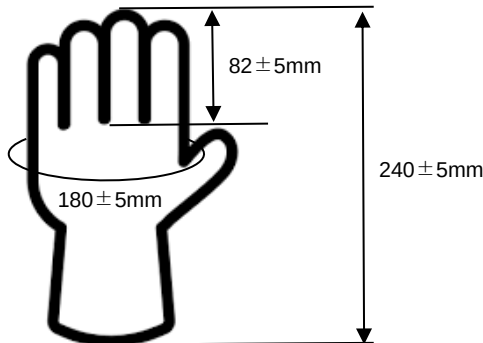

3. 原材料

ニトリルゴム

【使用目的又は効果】

医療施設等において用いる、検査・検診用、感染保護用手袋として粘膜や創部に接触するとき、湿性生体物質に触れるとき使用する非天然ゴムの手袋である。

【使用方法等】

- ・箱から取り出して両手に装着する
- ・使用は1回とし、使用後は破棄する

【使用上の注意】

- ・装着しやすくするために、手を十分に乾燥させて使用すること。
- ・60度以上の熱に弱いので、熱いものに触れないこと。
- ・とがったもの、鋭利な刃物などで傷をつけないように注意すること。
- ・感電のおそれがあるので、電気作業には使用しないこと。
- ・高濃度の薬品や溶剤（ガソリン、ベンジン等）には長時間使用しないこと。
- ・調理用には使用しないこと。
- ・植物油、灯油等油類がついた場合は早めに洗い落とすこと。

取扱い上の注意

本製品は汚染・感染のおそれがあるため再使用禁止

【保管方法及び有効期間】

- ・水濡れに注意して、高温、多湿な環境を避けて保管する。
- ・包装開封後は、直射日光や強い人工光線等を避けること。

耐用期間

5 年

包装

100枚/箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者

CGM Innovation株式会社

東京都江東区亀戸3丁目24番7号

TEL 03-6811-2345 FAX 03-6811-2346