

2017 年 6 月（第 4 版）（新記載要領に基づく改訂）  
2014 年 8 月（第 3 版）

届出番号 23B3X00006000012

医 04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

オペックスC

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切斷又は剥がれ落ちて体内遺残するおそれがあるため。]
- ・X線造影糸に電気メス等を近づけないこと。  
[切斷又は引火するおそれがあるため。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
スズラン株式会社  
お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

- ・X線造影材を入れたガーゼ製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%  
X線造影材（黒線）の材質：(固定材) ポリスチレン系熱可塑性  
エラストマー  
(造影剤) 硫酸バリウム  
(着色剤) カーボンブラック

【使用目的又は効果】

- ・出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部で用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。
- ・X線を検知できる成分を用いている。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷部には、滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。
- ・X線撮影において撮影体位や角度により陰影が不明瞭な場合がある。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。