

2017 年 6 月（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）
2014 年 8 月（第 2 版）

届出番号 23B3X00006000022

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

ツッペル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

スズラン株式会社

お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ又は綿100%の脱脂綿を、ガーゼで包んだ製品です。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・創傷面には、滅菌して使用すること。
- ・滅菌は、高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌ができる。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。