

医04 整形用品  
一般医療機器 X線造影材入りガーゼ 32374000

## 滅菌縫ガーゼXC

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止
- ・X線造影糸部分を直接挟んで使用しないこと。  
[切断又は抜け落ちて体内遺残するおそれがあるため。]
- ・X線造影糸に電気メス等を近づけないこと。  
[切断又は引火するおそれがあるため。]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
スズラン株式会社  
お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

#### 【形状・構造及び原理等】

- ・X線造影材を入れたガーゼを滅菌した製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
- X線造影材(黒線)の材質:(固定材)ポリスチレン系熱可塑性  
エラストマー  
(造影剤)硫酸バリウム  
(着色剤)カーボンブラック

#### 【使用目的又は効果】

- ・出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥、汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿又はセルロース製の薬品を含まない吸収材料をいう。
- ・X線を検知できる成分を用いている。

#### 【使用方法等】

適宜使用すること。

#### 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・X線撮影において撮影体位や角度により陰影が不明瞭な場合がある。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期限  
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。