

2017 年 6 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2009 年 3 月（第 1 版）

届出番号 23B3X00006000049

医 04 整形用品
一般医療機器 救急絆創膏 34864000

ドレッシング b

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

スズラン株式会社

お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

パッド：レーヨン綿、ポリエステル綿、ポリエチレン

粘着テープ：ポリウレタン、アクリル系粘着剤

【使用目的又は効果】

創傷面の保護

【使用方法等】

傷口を清潔にしてパッド部分を傷口に当て、粘着テープで固定して使用すること。

【使用上の注意】

- ・患部を清潔にし、水気をよく取って、パッド部分を汚さないように注意して使用すること。
- ・皮膚の弱い方は、同じところに繰り返し貼らず、粘着面の位置を変えたり、急激にはがしたりしないこと。
- ・救急絆創膏にかぶれやすい場合は使用しないこと。
- ・パッド部分が濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので貼りかえること。
- ・使用中、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期限

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証（当社データ）による】