

2017 年 6 月(第 2 版) (新記載要領に基づく改訂)
2010 年 5 月(第 1 版)

届出番号 23B3X00006000053

器 12 理学診療用器具
一般医療機器 止血用押圧用器具 70617000

滅菌Rコットン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

スズラン株式会社

お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿を滅菌した製品です。

【使用目的又は効果】

血管造影、その他の診断処置終了時に、大腿部又は前腕(橈骨動脈)部のカテーテル挿入部位を圧迫止血するために用いる器具をいう。

【使用方法等】

- ・止血部分に圧迫止血できる程度に押えて固定する
- ・本品は無菌的に滅菌袋から取り出し、そのまま直ちに1回限り使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期限

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。