

2017 年 6 月（第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2010 年 8 月（第 1 版）

届出番号 23B3X00006000057

医 04 整形用品
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000
熱傷被覆・保護材 11322101

ケアエイドパッド

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
スズラン株式会社
お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

防水性のある吸水コットンを、創傷接触面であるメッシュフィルム、浸出液等の漏出を防止するラップフィルムで挟んだ 3 層構造のもの。

【使用目的又は効果】

- ・創傷を被覆するために用いる、柔らかくふわふわした綿状の塊から成るパッドをいう。
- ・熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。

【使用方法等】

傷口を清潔にしてメッシュフィルムを傷口に当て、粘着テープ等で固定して使用すること。

【使用上の注意】

- ・ラップフィルムを創傷部側に使用しないこと。
- ・傷口を清潔にし、水気をよく取って、メッシュフィルムを汚さないように注意して使用すること。
- ・メッシュフィルムが濡れたり、汚れたままにしておくと傷の治りが悪くなる場合があるので適時に交換すること。
- ・使用中、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期限
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】