

医04 整形用品  
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000  
熱傷被覆・保護材 11322101

## ケアエイドパッドA

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者  
スズラン株式会社  
お問い合わせ先 Tel 0120-603-855

#### 【形状・構造及び原理等】

脱脂綿と高吸水性樹脂付き防水シートを重ねあわせ、穴のあいたPE袋で包んだもの。

#### 【使用目的又は効果】

- ・創傷を被覆するために用いる、柔らかくふわふわした綿状の塊から成るパッドをいう。
- ・熱傷皮膚を被覆及び保護し、熱傷部位の滲出液を吸収するために用いる幅広の層状ガーゼパッドをいう。

#### 【使用方法等】

1. 創部を生理食塩水や水道水等で洗浄し、汚れや異物を取り除く。
2. 穴あきPE袋から取り出さず、吸収面〔白色〕を創部に当て密着させる。
3. 医療用テープ等を用いて健常皮膚部で固定する。
4. 本品は少なくとも1日1回交換すること。

#### 【使用上の注意】

- ・穴あきPE袋から吸収体を取り出して使用しないこと。
- ・指定された面以外を創部側に当てて使用しないこと。
- ・本製品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・本品使用中は創部の観察を充分に行い、浸出液の量や創部の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。

#### 【保管方法又は有効期間等】

1. 保管方法
  - ・直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
  - ・小児の手の届かない場所に保管すること。
2. 有効期限  
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】