

医 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

滅菌ファーストケアガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
スズラン株式会社
お問い合わせ窓口 Tel 0120-603-855

【形状・構造及び原理等】

綿 100% のガーゼ製品

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする主としてガーゼから成る器具をいう。

【使用方法等】

患部の大きさや用途に応じて適宜お使いください。

【使用上の注意】

- ・お肌の弱い方が使用すると、かゆみやかぶれなどを生じる場合があります。症状があらわれた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
- ・傷当て用として使用する場合は、傷口を殺菌剤等で消毒してからご使用ください。
- ・雑菌などが繁殖するおそれがありますので、水やぬるま湯等を含ませたまま放置するのは止めてください。
- ・衛生的にご使用いただくために、開封後はなるべく早くご使用ください。
- ・体内に残らないように使用してください。
- ・包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないでください。
- ・使用後はトイレに流さず衛生的に処理してください。
- ・使用後は感染防止に注意して処理してください。

【保管方法又は有効期間等】

保管上の注意

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・においが強い物のそばに保管しないでください。においが移る場合があります。
- ・洗剤や薬品などの付着や高温多湿環境での保管等の場合、包装の色が落ちることがありますのでご注意ください。

有効期間

- ・使用期限：滅菌袋に記載〔自己認証（当社データ）による〕。