

医 04 整形用品
一般医療機器 手術用被覆・保護材 (JMDN コード 34654000)

ケアエイドシートC

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
スズラン株式会社
お問い合わせ窓口 Tel 0120-603-855

【形状、構造及び原理等】

本品は、創傷への適用面に多孔性のシートを付した被覆・保護材である。

【使用目的又は効果】

術後創傷のために用いる適切なサイズの被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

1. 創部を生理食塩水や水道水等で洗浄し、汚れや異物を取り除く。
2. 本品を適当な大きさに切り、創部に当て密着させる。
3. ガーゼ等の吸収材で本品を覆う。
4. 医療用テープ等を用いて健常皮膚部で固定する。
5. 本品は少なくとも 1 日 1 回交換すること。

【使用上の注意】

- ・指定された面以外を創部側に当てて使用しないこと。
- ・本製品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談すること。
- ・本品使用中は創部の観察を充分に行い、浸出液の量や創部の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
- ・関節部やあご等の凸凹部分はしわになりやすいので、ていねいに貼り付けること。
- ・1 度使用したものは再使用しないこと。

【保管方法又は有効期間等】

保管方法

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・小児の手の届かない場所に保管すること。