

歯科材料09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯面研磨材 JMDN: 70904000

コンクール クリーニングジェル <PMT C>

【警告】

1. 本品又は本品に含まれる成分に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
3. 万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【禁忌・禁止】

1. 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
2. 本品を【使用目的又は効果】に掲げた用途以外に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状 ジェル状
2. 組成
グリセリン、無水ケイ酸、ポリビニルピロリドン、水、その他
3. 原理
粘結成分(ポリビニルピロリドン)がタバコのヤニ等の着色汚れを吸着するとともに、研磨成分(無水ケイ酸)を研磨面に停留させ、物理的に研磨する。

【使用目的又は効果】

歯面の清掃及び研磨に用いる。

【使用方法等】

本品の適量を歯科用予防治療用ブラシ(ポリッシングブラシ)、研磨カップ(ラバーカップ)等に塗布して研磨するか、応用部位に直接貼付して歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等で研磨する。

【使用上の注意】

1. 歯科用予防治療用ブラシ、研磨カップ等に適した使用回転数範囲に注意して使用すること。

2. 歯科用駆動装置及びハンドピース等については、各メーカーの指示に従い、正しく使用すること。
3. 本品は乾燥すると残渣が落ちにくくなる場合があるので、使用後は速やかに水で洗浄すること。
4. 本品は液成分が分離する可能性があります、品質には問題ありません。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保管方法

1. 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
2. 高温・直射日光を避け、室温・常湿で保管すること。
3. 本品は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【主要文献及び文献請求先】

文献請求先

ウエルテック株式会社

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3

フリーダイヤル 0120-178049

URL <http://www.weltecnet.co.jp>

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

スモカ歯磨株式会社

第3種医療機器製造販売業

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-3-9

TEL 06-6471-0151

製造業者 スモカ歯磨株式会社

販売業者

ウエルテック株式会社

〒531-0072 大阪市北区豊崎3-19-3

フリーダイヤル 0120-178049

URL <http://www.weltecnet.co.jp>