

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

シリコンパッド

【形状・構造及び原理等】

本品はシリコンゴム製のセメント等の練和に用いるパッドで種々の色がある。

【使用目的又は効果】

各種セメント等を練和するために用いる。

【使用方法等】

本品上にセメント等を取り出し、練和する。

《使用方法に関連する使用上の注意》

1. 本品を滅菌する場合は次の方法で行うこと。
 - ・オートクレーブ滅菌 132℃ 15 分間
 - ・ケミクレーブ滅菌 132℃ 20 分間

【使用上の注意】

その他の注意

1. 酸化亜鉛ユージオール系セメント材を練和後、レジンセメントを練和すると硬化が阻害されることがある。
2. シリコン系の印象材とは融着するので使用しないこと。
3. 鋭利なスパチュラは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 高温多湿を避けて保管すること。

** *【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

- * 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。