

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード: 70682000


ギャラン™ ディispenser

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は印象材の手動練和器です。

2. 外観図

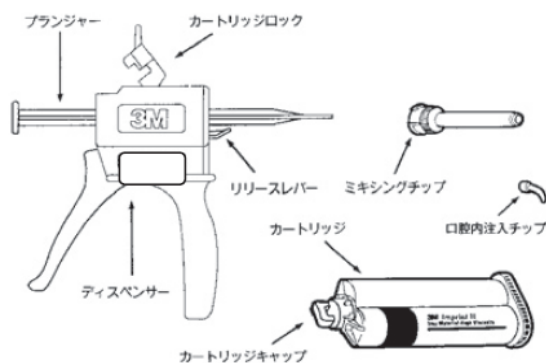


ミキシングチップ、口腔内注入チップ、カートリッジは本品と共に使用します。

【使用目的又は効果】


歯科用印象材を練和するために用いる。

【使用方法等】


1. ギャラン™ ディispenser(以下、ディispenserといいます)の黒いリリースレバーを親指で押しあげて(図1のa)、黒いプランジャーを止まる所までいっぱいに引きます。(図1のb)

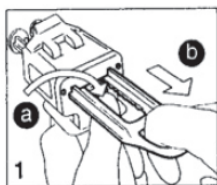

2. カートリッジを取り付けるには、まずカートリッジロック部を上げます。(図2のa) カートリッジのV型切込み部を下にして、ディispenserの取付け部に上からカートリッジを装着します。(図2) カートリッジのV型切込み部とディispenserのV型切込み部が合っているのを確認します。カートリッジロック部を下げてカートリッジを固定します。

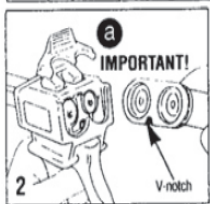


3. カートリッジキャップを反時計方向に90°回転させます。これでキャップはロックされていない状態になります。(図3) 次に、親指をキャップの上部にあて、親指と人差し指でキャップを挟んで、下方向にキャップを取り外します。(図4)



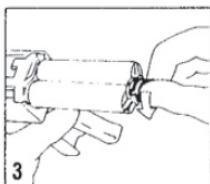


《使用方法に関連する使用上の注意》



カートリッジキャップを捨てないこと。印象材を使用した後、このカートリッジキャップをふたとして利用します。

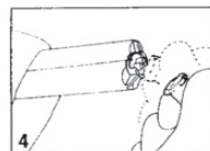

4. ベースとキャタリストペースト同じ円柱状で均等に出るまで試し出しします。(図5) 更にペーストを細く出したい場合は、ミキシングチップを取り付けます。万一、ペーストが均等に出ない時は、硬化物があるかどうかを確認して、硬化物はハンドルを軽く握りながらエクスプローラなどでかきだします。ペースト出口部をティッシュペーパーなどできれいに拭きます。
5. ミキシングチップのV型切込み部をカートリッジのV型切込み部に合わせて、ミキシングチップを確実にカートリッジに押し込みます。(図6) 次に、ミキシングチップの色付き部を時計回りに90°回転させると、ミキシングチップはロックされた状態になります。これで、ハンドルを握ると練和された印象材が出てきます。(図7)

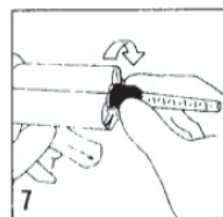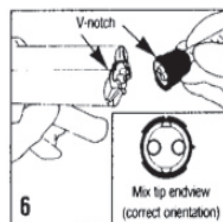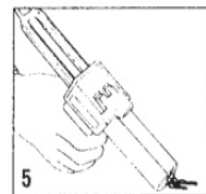


6. ミキシングチップの色付き部を時計回りと反対方向に90°回転させます。次に、親指をミキシングチップの上部にあて、親指と人差し指でミキシングチップを挟んで、下方向にミキシングチップを取り外します。(図8) 使用済みのミキシングチップは廃棄します。
7. 元々付いていたカートリッジキャップのV型切込み部をカートリッジのV型切込み部と合わせて、押し込みます。(図9のa) そして、キャップを時計回りに90°回転させるとロックされた状態になります。(図9のb) または、使用したミキシングチップを次回使用時まで付けたままにして保管用キャップとして使用することもできます。

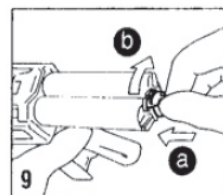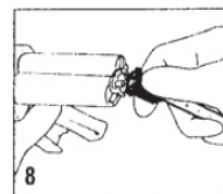

《使用方法に関連する使用上の注意》

- ・使用後のカートリッジは、使用したミキシングチップをつけたままにしておくか、カートリッジキャップを用いて、ペーストが空気に触れないようにしておくこと。ペーストが詰まったり、硬化不良の原因となる恐れがあります。
- ・次回使用時にはベースとキャタリストペーストが同じ円柱状で均等に出ることをディispenserのハンドルを握って確認すること。その後カートリッジに新しいミキシングチップを取り付けること。

8. ディスペンサーからカートリッジを取り外すには、ディスペンサーの黒いリリースレバーを親指で上に上げて (図 10 の a)、黒いプランジャーを止まるまでいっぱいに引きます。(図 10 の b) 次にカートリッジロック部を引き上げて (図 11 の a)、ディスペンサーを上にあげて取り外します。(図 11 の b)

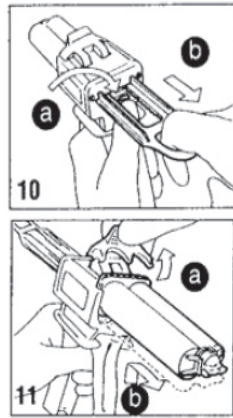

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・ ディスペンサーは分解し、ハンドルとプランジャーを別々に 135℃までの温度で滅菌が可能である。あるいは、アルコールのような強い有機溶媒を含まない市販の洗浄剤を利用することもできる。その際には使用する洗浄剤の取扱い説明書に従うこと。殺菌消毒剤は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・ 高温多湿を避けて保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

- * 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
- ** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

ギャランは 3M 社の商標です。

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。