

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

3M™ ESPE™ イントラオーラル シリンジ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造は下図の通り

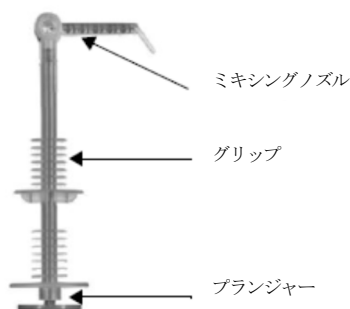

2. 材質

プラスチック

3. 原理

プランジャーを押してミキシングノズル内で歯科用印象材を練和し、練和物を注入するシリンジ。

【使用目的又は効果】

歯科用印象材を練和、注入するために用いる。注入する歯科用印象材はタイプ 2（中粘度）又はタイプ 3（低粘度）の歯科用シリコーン印象材。

【使用方法等】

1. 使用準備

- ディスペンサー（例：ギャラン™ディスペンサー）に印象材カートリッジ（50ml）をセットします。
- カートリッジのキャップ又は蓋として使用していたミキシングチップ（以後キャップ等）を取り外します。キャップ等は捨てずに保管しておきます。
- カートリッジの出口に詰まりが無いかを確認します。両ペーストが円柱状で均等に出るまで試し出しを行います。
- プランジャーを本品から引き抜きます。
- 本品を印象材カートリッジ(50ml)に差し込み、ディスペンサーを用いて必要量の印象材を充填します。本品は最大で 1.5ml を充填することができ、2-4 歯の支台歯に使用できます。

《使用方法に関連する使用上の注意》

- 充填中は本品をしっかり持つこと。
 - 印象材の充填量が、ミキシングノズルとのつなぎ目より手前 1cm にあるラインを超えないように注意すること。
 - ミキシングノズルの角度は 90 度に曲げたままにしておくこと。
 - 本品を印象材カートリッジから取り外します。印象材カートリッジはキャップ等にて蓋をします。
- #### 《使用方法に関連する使用上の注意》
- 同一のキャップ等にて蓋をするのが 2 回目以降の際には、キャタリストペーストとベースペーストが接触することが無いように注意すること。
- プランジャーを本品に差し込み、ペーストがミキシングノ

ズルとのつなぎ目からあふれないように注意しながら押しこみます。

《使用方法に関連する使用上の注意》

- ミキシングノズルのつなぎ目から漏れだしたペーストは、使用前にぬぐい取ること。
 - 準備が完了した本品は 12 時間以内に使用すること。
2. 印象材の練和及び印象採得

- 印象採得を行う直前に、ミキシングノズルを 180 度を開きます。

《使用方法に関連する使用上の注意》

- ペーストがつなぎ目から漏れ出すのを防ぐためにミキシングノズルは完全に開くこと。
- 少量の試し出しを練板紙で行い、両ペーストが均一に練和されていることを確かめます。
 - 印象材を注入します。
- #### 《使用方法に関連する使用上の注意》
- 本品に印象材の再充填をしないこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品は再使用しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

- * 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
- ** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

3M、ESPE、ギャランは 3M 社又はその関連会社の商標です。

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。