

**2023 年 8 月改訂（第 5 版）
*2020 年 8 月改訂（第 4 版）


医療機器届出番号：13B1X10109000258

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

スコッチボンド™ユニバーサル アドヒーズ用 混和皿

【形状・構造及び原理等】

1. 原理：本品は、歯科治療時に、適量の接着材を一時的に貯留するための窪み（ウェル）をもち、遮光のための蓋、歯科用ブラシ置きを有している。
2. 形状：下図に示す。

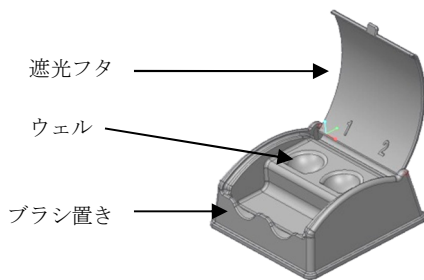

3. 原材料：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

歯科用の接着材などの歯科材料を容器から取り出し、患者へ適用するまで一時的に貯留するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用する接着材などの歯科材料を、手順に従いウェルに滴下する。
2. 接着材使用時以外は蓋をして、蒸発、乾燥、光による硬化を遅らせる。

《使用方法に関連する使用上の注意》

1 回の使用は 30 分以内とし、1 人の患者に使用後は、清掃、消毒すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

使用後は余った接着材等を拭き取り、次亜塩素酸ナトリウムあるいはエタノールにて消毒すること。また滅菌を行う場合にはエチレンオキシサイドガス滅菌にて行うこと。複数患者での共用はしないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者
* 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社
** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

スコッチボンドは 3M 社または関連会社の商標です。

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。