

ターミネーター

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・ X 線防護材に損傷、又はそのおそれのある場合は使用しないこと。〔本品の性能が発揮できないおそれがある。〕
- ・ 蒸気滅菌禁止〔熱により X 線防護材が著しく損傷するため。〕

【形状・構造及び原理等】

組成

X 線防護材（遮へいシート）：タングステン、マグネシウム、チタン、ビスマス、バリウム（無鉛）

形状

本体：遮へいシート、フレーム



付属品：クリアカバー（非医療機器）

※デザインの変更により、写真と実物の形状や仕様等が異なる場合があります。

作動・動作原理

遮へいシートに含まれる X 線防護材が X 線を減衰させ、不必要な放射線被ばくから、術者等の体の一部を保護する。

【使用目的又は効果】

本品は、診断や治療における不必要な放射線被ばくから、術者等の体の一部を保護するために使用する自立型の移動式バリヤである。

【使用方法等】

使用方法

1. 目視、触覚等による点検を行い（「使用者による保守点検事項」参照）、遮へいシートの X 線防護材に、破れ、ひび割れ、裂け目がないことを確認する。
2. フレームに遮へいシートを取り付け、高さを調節する。
3. 汚れ防止用のクリアカバーを取り付ける。
4. 放射線源と術者等の間に本品を移動し、術者等がフレーム内に入る。

使用後

1. 本品を移動させる。
2. 目視、触覚等による点検を行い（「使用者による保守点検事項」参照）、遮へいシートの X 線防護材に、破れ、ひび割れ、裂け目がないように保管する。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 一次放射線（直接線）の放射線被ばくからの保護には使用しないこと。
- *2. 折り目を押さえつけたり、小さく複数回に折り畳む等、X 線防護材が強く折り曲げられると、損傷する原因となるので注意すること。
- *3. 折り畳んだ本品の上には物を置かないこと。
4. 機材などの角を本品にあてないこと。〔穴があき損傷の原因となるため。〕
5. 消毒の際は、医療用消毒剤（アルコール 20%以下）で布地を清拭すること。有機溶媒、アセトン、漂白剤を含む消毒剤を使用しないこと。〔変質や早期劣化の恐れがあるため。〕

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本品使用の際は、放射線防護衣を必ず併用すること。
バリアテクノロジーズ社製のターミネーター用ベスト「BF ターミネーターベスト」（販売名：バリアフレックス 届出番号：27B1X00011J00001）の併用を推奨する。
2. 使用状況、使用頻度により、X 線防護材にひび割れ、穴あきなどの損傷が起こる可能性がある。日常点検および定期点検を実施すること。〔本品の性能を発揮できないおそれがある。〕

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等 Avoid して保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

日常点検

日常の始業、終業時に目視、触覚等による点検を行うこと。X 線防護材が損傷しているおそれがあると判断した場合は、使用を中止して X 線透視又は透過写真撮影による検査を行うこと。

定期点検

6 ヶ月に 1 回以上の X 線透視又は透過写真撮影による検査を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

スーガン株式会社
TEL (06) 6354-6181

【製造業者】

バリアテクノロジーズ社（Barrier Technologies, LLC.）、アメリカ

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

【発売元】



信頼をかたちに

シーマン株式会社®

大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044
http://www.sheen-man.co.jp
TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114