

## SX-Pro X 線防護眼鏡

### 【禁忌・禁止】

#### 使用方法

- 本品に損傷、又はそのおそれのある場合は使用しないこと。[本品の性能を発揮できないおそれがあるため]
- \*\*<フィットオーバータイプ>アンモニア系洗浄剤、並びにアセトンまたはアセトンを含む薬液を使用しないこと。\*\*<スポーツタイプ>アセトンまたはアセトンを含む薬液を使用しないこと。[破損の原因となるため]

### 【形状・構造及び原理等】

#### 組成

- フロントレンズ：鉛入りガラス
- サイドシールド：タングステンを含む

#### 形状

\*\*<フィットオーバータイプ>



\*\*<スポーツタイプ>



### 【使用目的又は効果】

本品は、診断や治療における不必要な X 線被ばくから、術者等の眼を保護するために使用する防護用品である。

### 【使用方法等】

#### 使用方法

- \*\*<フィットオーバータイプ>
- 本品を眼鏡の上から掛ける。本品にノーズパッド（オプション）を取り付けた場合は、通常の眼鏡のように掛ける。
  - 必要に応じて、テンプルエンド（耳掛け部分）を上下左右に動かして使用者の耳に合わせて調節する。
  - 付属のヘッドバンドで固定する。
  - \*\*4.ヘッドバンドをゆるめてから、左右のテンプルを両手で持ち、眼鏡を外す。

\*\*<スポーツタイプ>

- 1.本品を通常の眼鏡のように掛ける。
- 2.必要に応じて、テンプルエンド（耳掛け部分）を上下左右に動かして使用者の耳に合わせて調節する。
- 3.付属のグラスコードで固定する。
- 4.左右のテンプルを両手で持ち、眼鏡を前方に引っ張ることでグラスコードをゆるめてから、眼鏡を外す。

#### 使用方法等に関連する使用上の注意

一次放射線（直接線）の放射線被ばくからの保護には使用しないこと。

### 【使用上の注意】

#### 重要な基本的注意

- 1.フレームが損傷している場合、又は顔面に密着していない場合は、使用を中止すること。[防護効果が低減するため。]
- 2.落とす等の衝撃を与えないように、取り扱いには十分注意すること。[破損の原因となる。]
- \*3.テンプルエンド（耳掛け部分）を曲げる際は、指で力を加えながらゆっくり行い、過度に力を加えないこと。[破損の原因となる。]
- \*\*4.レンズを内側から外側に向けて押し出さないこと。[レンズ外れの原因となる。]
- 5.廃棄する場合は、必ず地方自治体の条例・規則に従い廃棄すること。[レンズに鉛を含んでいるため。]

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 保管方法


水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等避け、ハードケース（保護ケース／メガネケース）に入れて保管すること。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 使用者による保守点検事項

##### 日常点検

- \*\*1.日常の始業、終業時に目視、触覚等により点検（レンズに欠け・ひび・割れ・外れ等がないこと、サイドシールドの剥がれ等がないこと）を必ず行うこと。

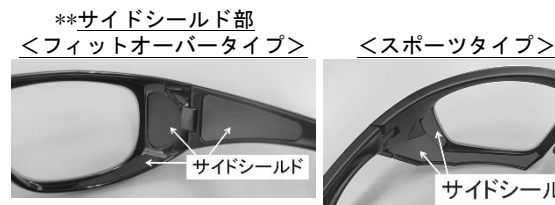

- 2.レンズに傷が付くのを防ぐため、クリーニングの際は、非研磨性中性洗剤を用いて水または 40℃までのお湯で洗った後柔らかな布で拭き取ること。レンズ以外の部分は、「クリーニング方法」を参照のこと。

## ■クリーニング方法

## \*\*&lt;フィットオーバータイプ&gt;

使用する薬液等	レンズ	本品(レンズ以外)
非研磨性中性洗剤	○	○
水または 40℃までのお湯	○	○
消毒用アルコール	×	○
アンモニア系洗剤	×	×
アセトンまたは アセトンを含む薬液	×	×

## \*\*&lt;スポーツタイプ&gt;

使用する薬液等	レンズ	本品(レンズ以外) 及びグラスコード
非研磨性中性洗剤	○	○
水または 40℃までのお湯	○	○
消毒用アルコール	×	○
アンモニア系洗剤	×	○
アセトンまたは アセトンを含む薬液	×	×

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

## 【製造販売業者】

スーガン株式会社  
TEL (06) 6354-6181

## 【製造業者】

日本レンズ工業株式会社

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元  
までお問い合わせください。

## 【発売元】

