

機械器具 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用術者向け眼鏡 (JMDN コード: 38884000)

SX-Pro Neo X 線防護眼鏡

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・本品に損傷、又はそのおそれのある場合は使用しないこと。[本品の性能を発揮できないおそれがあるため。]
- ・アンモニア系洗浄剤、並びにアセトン又はアセトンを含む薬液を使用しないこと。[破損の原因となるため。]

【形状・構造及び原理等】

組成

フロントレンズ：鉛入りガラス
サイドシールド：タングステンを含む

形状



【使用目的又は効果】

本品は、診断や治療における不必要な X 線被ばくから、術者等の眼を保護するために使用する防護用品である。

【使用方法等】

1. 本品を通常の眼鏡のように掛け、フロント下部と頬の隙間が狭くなるように角度を調節する。
2. 必要に応じて、テンプルエンド（耳掛け部分）を上下左右に動かして使用者の耳に合わせて調節する。
3. 付属のヘッドバンドで固定する。

使用方法等に関連する使用上の注意

1. 一次放射線（直接線）の放射線被ばくからの保護には使用しないこと。
2. 本品のレンズには曇り止めコート（又は曇り止め加工）が施されていないため、使用前には、レンズの汚れを落とし、付属又は市販の曇り止めでレンズを拭いてから使用することを推奨する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. フレームが損傷している場合、又は顔面に密着していない場合は、使用を中止すること。[防護効果が低減するため。]
2. 落とす等の衝撃を与えないように、取り扱いには十分注意すること。[破損の原因となる。]
3. フロント部の角度調節は、調節できる範囲で行い、過度な力を加えないこと。[破損の原因となる。]
4. テンプルエンド(耳掛け部分)を曲げる際は、指で力を加えながらゆっくり行い、過度な力を加えないこと。[破損の原因となる。]
5. 廃棄する場合は、必ず地方自治体の条例・規則に従い廃棄すること。[レンズに鉛を含んでいるため。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等避け、ハードケース（保護ケース/メガネケース）に入れて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

日常点検

1. 日常の始業、終業時に目視、触覚等により点検を必ず行うこと。
2. 本品をクリーニングする際は、レンズに傷が付くのを防ぐため、非研磨性中性洗剤、並びに水又は 40℃以下のお湯（10 秒以内）を用いて洗浄した後、柔らかな布で拭き取ること。
消毒用アルコールによるクリーニングができる部分は、フレーム及びノーズパッド（10 秒以内）であり、レンズはできない。但し、いずれもアンモニア系洗浄剤及びアセトン又はアセトンを含む薬液を使用しないこと。

■クリーニング方法

	レンズ	本品 (レンズ以外)
非研磨性中性洗剤の使用	○	○
水又は 40℃までのお湯（10 秒以内）の使用	○	○
消毒用アルコールの使用	×	○ (ノーズパッドは 10 秒以内)
アンモニア系洗浄剤並びにアセトン又はアセトンを含む薬液の使用	×	×

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

スーガン株式会社
TEL (06) 6354-6181

【製造業者】

日本レンズ工業株式会社

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

【発売元】



信頼をかたちに

大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044

<https://www.sheen-man.co.jp>

TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114