

機械器具 11 放射線障害防護用器具

一般医療機器 放射線防護用前掛 (JMDNコード: 38355000)
 (一般医療機器 放射線防護用生殖腺防護具 (JMDNコード: 38367000))
 (一般医療機器 放射線防護用カラー (JMDNコード: 38358000))

SX-プロテクター

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・X線防護材に損傷、又はそのおそれのある場合は使用しないこと。[本品の性能が発揮できないおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】


組成

X線防護材: 樹脂に鉛同等のX線防護に適した元素を混和したもの(タングステンほか)。

保護材: ポリウレタン及びポリエステル(表生地)、
ナイロン(裏生地)。

形状

X線防護材を保護材で覆う構造となっており部位に応じて装着できる形状にしたものである。

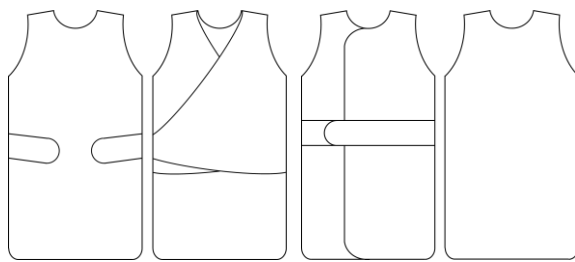

エプロン

コート



ネックガード

※デザインの変更により、イラストと実物の形状や仕様等が異なる場合があります。

作動・動作原理

X線防護材がX線を減衰させ、不必要なX線被ばくから、術者等の体の一部を保護する。

【使用目的又は効果】

使用目的

本品は、診断や治療における不必要なX線被ばくから、術者等の体の一部を保護するために使用する着脱式の防護用品である。

【使用方法等】

使用方法

1. 目視、触覚等による点検を行い(「使用者による保守点検事項」参照)、本品に破れ、ひび割れ、裂け目がないことを確認し本品を着る。
2. 本品を脱いだ後、目視、触覚等による点検を行い(「使用者による保守点検事項」参照)、ハンガーに掛ける等して折り曲げずに保管する(「保管方法」参照)。

使用方法等に関連する使用上の注意

- ・保護したい体の箇所を覆うことのできる、体のサイズに合う物を選ぶこと。
- ・一次放射線(直接線)の放射線被ばくからの保護には使用しないこと。
- ・X線防護材に損傷、又はそのおそれのある場合は使用しないこと。
- ・折り曲げ等(折り目を押さえつけたり、小さく複数回に折り畳んだり、折り畳んだ本品の上に物を置く等)が繰り返されると、X線防護材の遮へい効果を損ずる原因となるので注意すること。
- ・穴あき等の損傷を防ぐため機材などの角を本品にあてないこと。
- ・外観に傷、変形等が見つかったときは使用しないこと。
- ・損傷の原因となる折れ等を防ぐため、保管方法に記載の方法に従って保管すること。
- ・消毒の際は、消毒用アルコールで清拭すること。ガス滅菌、蒸気滅菌、煮沸、有機溶媒、アセトン、漂白剤を含む消毒剤は変質や早期劣化の恐れがあるため使用しないこと。
- ・汚れは水又は中性洗剤で拭き取ること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

使用状況、使用頻度により、X線防護材にひび割れ、穴あきなどの損傷が起こる可能性がある。日常点検および定期点検を実施すること。[本品の性能を発揮できないおそれがあるため。]

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. ハンガーに掛ける等して折り曲げずに保管すること。
2. 直射日光が当たる場所や暖房器具高温環境下での保管はしないこと。
3. 多湿もしくは結露する場所では保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

日常点検

日常の始業、終業時に目視、触覚等による点検を行うこと。X線防護材が損傷しているおそれがあると判断した場合は、使用を中止してX線透視又は透過写真撮影による検査を行うこと。

定期点検

1年に1回以上のX線透視又は透過写真撮影による検査を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

スーガン株式会社

TEL (06) 6354-6181

【製造業者】

スーガン株式会社

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

【発売元】



大阪市北区東天満1丁目12番10号 〒530-0044

<https://www.sheen-man.co.jp>

TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114