

MDT エックス線アイプロテクター

**【形状、構造及び原理等】

本品は、放射線防護材を含むレンズとサイドシールドが放射線を減衰させ、不必要な放射線被曝から、術者や他の人員の眼を保護する。

1. 種類

本品は、用途により使い分けのために、16種類の形状・サイズがある。



2. 性能

モデル	鉛当量:Pb	誤差
i-Glass 12	0.75	±0.05
i-Glass 20	0.75	±0.05
i-Glass 41	0.75	±0.05
i-Glass 43	0.75	±0.05
Sportive 70	0.75	±0.05
Gentle 90	0.75	±0.05
Nike 50	0.5	±0.05
Cross 65	0.75	±0.05
MDT Budget	0.5	±0.05
Nike Brazen	0.5 / 1.0	±0.05
Nike Silver	0.5 or 0.75 / 1.0	±0.05
Focus	0.5	±0.05
Nike Blue	0.5 or 0.75 / 1.0	±0.05
Discovery	0.5 or 0.75 / 1.0	±0.05
S-Cross	0.5 or 0.75 / 1.0	±0.05
R-Cross	0.5 or 0.75 / 1.0	±0.05

【使用目的又は効果】

本品は、診断や治療のための医科・歯科処置における不必要な放射線被曝から術者や他の人員の眼を保護するために使用する。

**【使用方法等】

本品の着用は顔の大きさに適合するものを正しく使用する。

**【使用上の注意】

<重要な基本的注意事項>

- ・防護具に損傷の認められたものは使用しないこと。[正常なX線遮へい性能が保たれていない可能性がある]
- ・衝突、転倒などによる衝撃が加わった場合は、直ちに使用を中止し、点検すること。[内部遮蔽材に損傷している可能性がある]
- ・本製品は、汗や水等で湿ったとき、摩擦により色落ちし、他の衣料に色が移る可能性がある。
- ・着用時は視覚・触覚検査により、異常の有無を確認するとともに、異常が発見された場合は、直ちに使用を中止すること。[使用状況、使用頻度により、内部の遮蔽材が脱落、ひび割れを起こす可能性がある]

**【保管方法及び有効期間等】

防護レンズに傷がつかないように専用のケースに入れて保管すること。有効期間の定めなし。

**【保守・点検に係る事項】

レンズのクリーニングに、専用のクロス及びクリーナーを使用して表面を清掃する。研磨剤等、レンズに傷のつく恐れのある薬剤は使用しないこと。サイドシールドのクリーニングは、70%イソプロピルアルコールを浸した清潔な布で、表面を清掃する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

<製造販売業者>

スター・プロダクト株式会社
電話:03-3812-6005

<製造業者>

MDT X-RAY B.V.
オランダ