

# スマート スペシャルワックス

## 【形状、構造及び原理等】

- 1) 形状、構造等  
形状：缶入り固形体  
色調：グレー  
溶融点：64℃
- 2) 原理  
本品を加熱・軟化させロストワックス法による歯科修復物のろう型を作製する硬めのキャスティングワックス。

## 【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴補修物のろう型作製のキャスティングワックス。

## 【使用方法等】

＜使用中の操作＞

- 1) 本品を適温に加熱したインスツルメント等で適度に軟化させる。
- 2) 通法に従い、軟化させた本品をインスツルメント等で築盛し、歯科修復物を形成する。
- 3) 築盛した本品の過不足は盛り足したり、削ったりして操作を終了する。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に室温で保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 本材を高温となる場所(ストーブの傍、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- 4) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 5) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＜使用期限＞

- 1) 本品は包装に記載の※使用期限までに使用すること。  
〔記載の使用期限は自己認証(製造元)データによる〕

## \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**  
株式会社スマートプラクティスジャパン  
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

Karl Berg GmbH  
国名：ドイツ