

シンプリー ブルー

【形状、構造及び原理等】

1) 形状、構造

名称	機能	形状	色
A 剤	促進材	ペースト状	白色
B 剤	ベース	ペースト状	青色

【物理的性質】

ショア硬さ：18

【使用目的又は効果】

本品は、シリコーン等の合成ゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いるものである。

【使用方法等】

＜使用中の操作＞

- 1) 複印象用の専用フラスコ(プラスチック製／ガラス製)を用意する。
- 2) マスターモデルは乾燥させ、油脂などの汚れがないようにしておく。
- 3) ワックスでブロックアウト処理したマスターモデルを専用フラスコのベースに固定する。プラスチック製フラスコのパラタルーチは、模型に合わせ高さを調整する。
- 4) A 剤(白色)と B 剤(青色)を 1 : 1 の割合でミキシングボウルに入れ、手早く均一な色になるまで練和する。練和後、パイプレーターで軽く振動を与えながら空気を巻き込まないように十分注意しながら注入する。
- 5) 本材は室温(23℃)で約 60 分後に硬化する。硬化後、エアーガンを利用しながらベースを外し、同様にマスターモデルを取り外す。
- 6) 耐火模型材を注入する前に、印象面を表面活性材で処理し、余剰分を除去して十分に乾燥させる。

混和比	1 : 1
練和時間	約 1 分
作業時間	4 ～ 6 分
硬化時間	60 分(室温 23℃)

※操作時間は、温度 23℃、相対湿度 50±5%での値である。これらの値は温度によって変わる。

＜使用方法等に関する使用上の注意＞

- 1) 本材又は練和物が皮膚に付着した場合は、布又は紙などで拭き取り、石鹼でよく洗浄すること。また、作業後は必ず、うがい、手洗い、洗面などを行うこと。
- 2) 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合は、直ちに多量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
- 3) 本材は、換気のよいところで使用すること。
- 4) 他の製品と混用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 直射日光及び高温多湿を避け、25℃以下で保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 開封後は密封して保管すること。

- 4) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

＜有効期限＞

- 1) 容器に記載の使用期限までに使用すること。本品は、製造日より2年間有効である。(記載の使用期限は自己認証(製造元)データによる)

※【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

Servo-Dental GmbH & Co. KG
国名：ドイツ