

スライクリス レッドマージン&ベースワックス

【形状、構造及び原理等】

1) 形状

形状：固形

色調	用途
レッド	マージン&ベース形成

融点：56～64℃

【使用目的又は効果】

本品は、ロストワックス法による固定式補綴補修物のろう型作製の
のキャスティングワックスである。

【使用方法等】

＜使用中の操作＞

- 1) 本品を溶解し、模型に盛り上げ形成する。
- 2) 通法に従い、埋没・鋳造を行う。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に室温で保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 本材を高温となる場所(ストーブの傍、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- 4) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 5) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

SLAYCRIS PRODUCTS
国名：アメリカ合衆国