

スライクリス ピュアホワイトワックス

【形状、構造及び原理等】

1) 形状

形状：固形

色調	用途
ホワイト (A 2 相当)	クラウン等の歯冠形成、症例提示等

融点：56～64℃

【使用目的又は効果】

本品は、ロストワックス法による固定式補綴補修物のろう型作製用のキャスティングワックスである。

【使用方法等】

＜使用中の操作＞

- 1) 本品を溶解し、模型に盛り上げ形成する。
- 2) 通法に従い、埋没・鋳造を行う。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 本材は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に室温で保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 本材を高温となる場所(ストーブの傍、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- 4) 使用及び保管場所には、消火装置を備えること。
- 5) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

SLAYCRIS PRODUCTS
国名：アメリカ合衆国