

インスタ グレーズ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・口腔内に使用した場合は再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1) 形状、構造

製品の構成は次のとおり。

| 種類 | 構成品 | 色 |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| インスタ グレーズ | フェルトホイール ペースト(粒径約 3 μ m) | — 青色 |
| インスタ グレーズ HYB | フェルトホイール ペースト(粒径約 0.5 μ m) | — 灰色 |

2) 原材料

フェルトホイール：天然毛

ペースト：グリセリン、トリエチレングリコール、ダイヤモンド
粉末、ポリエチレングリコール、ベントナイト

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

＜使用前の準備＞

- 1) フェルトホイール、ペーストに異常がないか確認すること。
- 2) 口腔内で使用する場合はフェルトホイールを滅菌すること。
- 3) 研磨を行う面をダイヤモンドポイント(本申請対象外)等であらかじめ滑らかに整えておく。

＜使用中の操作＞

- 1) フェルトホイールを歯科用ハンドピースに装着し、ペーストを適量塗布する。
- 2) フェルトホイールを回転させ、対象物にあてて研磨を行う。10-20秒断続的にあて、必要に応じて4-5秒ずつ追加する。
- 3) 口腔内で使用する場合は回転数を4000rpm以下とし、熱をもたないよう0.5-1秒のインターバルをとって研磨を行う。
- 4) 研磨後は研磨面を水で洗浄し、ティッシュ等で水分を拭き取る。

＜使用後の処置＞

- 1) 口腔内で使用した場合はフェルトホイールは再使用禁止である。使用後は廃棄すること。

＜使用方法等に関する使用上の注意＞

- 1) 乾燥した環境下で使用する。
- 2) ペーストを塗布する際は、飛び散るのを防ぐためにごく少量とし、指などで塗りこむこと。
- 3) 研磨面を水で洗浄した後はこすらないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に、ヒビ、キズがないか、又作業部・柄部に大きなキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

George Taub Products & Fusion Co., Inc.
国名：アメリカ合衆国