


アボットロビンソン ブリストルブラシ

【形状、構造及び原理等】

1) 形状、構造

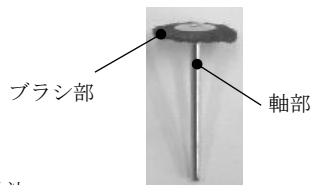

※形状は代表例

2) 寸法

サイズ	毛の種類	毛の色	ブラシ部径 (mm)
No. 9	ソフト	ブラウン	14
	スタンダード	シルバーグレー	14
	エキストラハード	ブラック	14
No. 11	ソフト	ブラウン	17
	スタンダード	シルバーグレー	17
	エキストラハード	ブラック	17
No. 12	ソフト	ブラウン	19
	スタンダード	シルバーグレー	19
	エキストラハード	ブラック	19

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

〈製造業者〉

Buffalo Dental Mfg. Co., Inc.
国名：アメリカ合衆国

【使用目的又は効果】

本品は、補綴物等の研磨に用いる器材である。

*【使用方法等】

〈使用前の準備〉

- 1) ブラシ部、軸に異常がないか確認すること。

〈使用中の操作〉

- 1) 歯科用ハンドピースに装着して回転させ、対象物にブラシ部をあて研磨する。

〈使用方法等に関する使用上の注意〉

- 1) ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従って、軸を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め回転させて、揺れがないことを確認すること。折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。
- 3) 過度の回転数を超えて使用しないこと。
- 4) 排気装置の備わった環境で作業すること。
- 5) 使用時には保護メガネ、手袋等の保護具を着用すること。
- 6) 使用時には防塵マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に、ヒビ、キズがないか、又作業部・柄部に大きなキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。
- 2) 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。