

# セパレーター

## 【形状、構造及び原理等】

### 1) 形状、構造

型番	形状	寸法 [外径×厚さ] (mm)
L4110	ディスク状	22×0.6
L4120	ディスク状	25×0.7

## 【使用目的又は効果】

本品は、アルミナ等を用いる技工用研削材である。

## 【使用方法等】

### 〈使用前の準備〉

- 1) ディスク全体に傷や割れ、歪み等が無いかを確認すること。

### 〈使用中の操作〉

- 1) 歯科技工用ハンドピースに装着して回転させ、対象物に先端部をあて切削する。

### 〈使用方法等に関する使用上の注意〉

- 1) 使用する際は、本品が歯科技工用ハンドピースに根元まで差し込まれていることを確認すること。
- 2) 粉じんを吸い込んだり、目に入ったりしないよう、眼鏡、マスク等の保護具を装着すること。
- 3) 吸引環境下で使用する。
- 4) フッ化水素酸とは接触させないこと。変形する恐れがある。

## 【保管方法及び有効期間等】

### 〈保管方法〉

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

## 【保守・点検に係る事項】

- 1) 使用前・使用後に、ヒビ、キズがないか、又作業部・柄部に大きなキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

## \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

### 〈製造販売業者〉

  
株式会社スマートプラクティスジャパン  
TEL 0120-415-418

### 〈製造業者〉

Major Prodotti Dentari S.p.A.  
国名：イタリア