



HEテクニカルポリリッシャー

【形状、構造及び原理等】

1) 形状

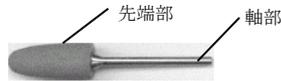

** 2) 寸法

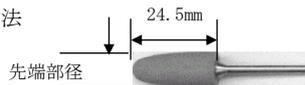

型番	先端径 (mm)
0664HP	10

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

〈製造業者〉

EDENTA AG
国名：スイス

【使用目的又は効果】

本品は、アルミナ等を用いる技工用研削材である。

【使用方法等】

〈使用前の準備〉

- 1) 先端部、軸部に異状がないか確認すること。

〈使用中の操作〉

- 1) 歯科技工用ハンドピースに装着して回転させ、対象物に先端部をあてて研削する。

推奨回転数
10,000-15,000rpm

〈使用方法に関連する使用上の注意〉

- 1) 使用する際は、本品が歯科用ハンドピースのチャックに根元まで差し込まれていることを確認すること。
- 2) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。接触圧は材質によるが0.3-2Nを推奨する。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意〉

- 1) 粗雑な取扱いは本品の寿命を著しく低下させるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

〈使用者による保守点検事項〉

- 1) 使用前・使用後に、ヒビ、キズがないか、又作業部・軸部に大きなキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。