

エルコカッター II

【形状、構造及び原理等】

1) 形状



【使用目的又は効果】

本品は、スチール製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具である。

【使用方法等】

<使用前の準備>

- 1) 先端部、軸部に異常がないか確認すること

<使用中の操作>

- 1) 歯科技工用ハンドピースに装着して回転させ、対象物に先端部をあて切削する。

推奨回転数
20,000-40,000rpm

【使用上の注意】

<使用注意>

- 1) 損傷、変形(損傷、変形(錆び、表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
- 2) 折損等の原因となるので、器具に対して、曲げ、切削、打刻(刻印)等の二次加工(改造)を行わないこと。
- 3) 使用する際は、本品が根元までチャックに差し込まれていることを確認すること。
- 4) 粉じんを吸い込んだり、目に入ったりしないよう、眼鏡、マスク等の保護具を装着すること。
- 5) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 6) 粗雑な取扱は、器具の寿命を著しく低下させるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- 1) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 2) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 3) 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜交換すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

<製造業者>

ERKODENT Erich Kopp GmbH
国名：ドイツ