

医療用品 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋
(歯科用手袋)

JMDN 70976000
JMDN 70911000)

リフレクション センシティブ(サファイア)

再使用禁止


【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

本品はパウダーフリーの左右兼用タイプである。

原材料：合成ゴム

1) 形状、寸法

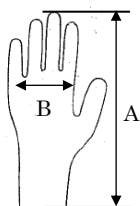

(mm)

	X-S	S	M	L	X-L
A	240 以上				
B	80±5	85±5	95±5	106±5	115±5

【使用目的又は効果】

本品は、手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する合成素材製手袋である。また、歯科の診察、治療及び処置に用いることもできる。

【使用方法等】

＜使用前の準備＞

包装を開封し、手袋を取り出し手に装着する。

＜使用中の操作＞

診察、治療及び処置等に用いる。

＜使用後の処置＞

本品は 1 回限りの使い捨てである。使用後は廃棄すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 合成ゴムは、天然ゴムに含まれているような、アレルギーを起こさせるたん白質を含んでいないが、製造過程で使われる化学物質により、使用中にかゆみ、かぶれ、発疹などのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- 2) 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。

＜相互作用＞

- 1) 薬品、溶剤等によって膨潤したり、浸透したりする場合がありますので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、40℃以下で保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 3) 医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

YTY Industry (Manjung) Sdn. Bhd.
国名：マレーシア