

機械器具 32 医療用吸引器  
一般医療機器 吸引器用キャニスタ (JMDN: 34858000)

再使用禁止


## サクシオン ポリープ回収用トラップ-STE

### 【禁忌・禁止】

1. 使用方法
  - 1) 再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

1. 形状
  - 1) 本体

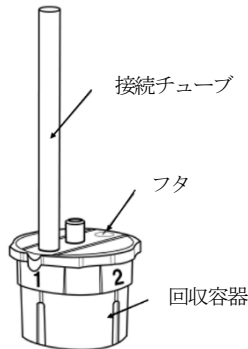

2. 寸法
  - ・接続チューブ: 127mm
  - ・フタ直径:  $\phi 60.9\text{mm}$

3. 原理
 

内視鏡の吸引口金と吸引器の間に接続し、吸引により経内視鏡的に回収された組織を一時保管できる。


### 【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡の吸引口と吸引器の間に接続し、吸引により経内視鏡的に回収された組織を一時保管するために用いる。

### 【使用方法等】

<操作手順(例)>

- 1) 本品をパッケージから取り出し、吸引器に繋がるチューブを回収容器のフタ中心部にある突起部に接続する(図1)。

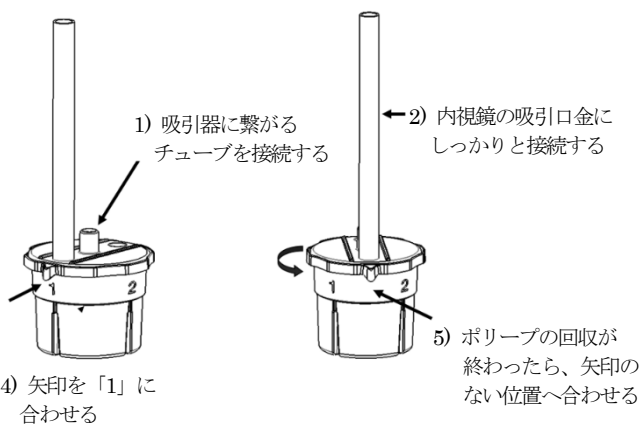

- 2) 本品の接続チューブを内視鏡の吸引口金にしっかりと接続する(図2)。
- 3) 通常の吸引は、フタの矢印がついていない位置に合わせて行う。
- 4) ポリープを回収する際はフタを回転させ、矢印を「1」に合わせてから吸引する(図1)。
- 5) ポリープの回収が終わったら、フタを右(反時計回り)に回転させ、矢印を番号のない位置へ合わせる(図2)。
- 6) 続けてポリープを回収する際は、フタを更に回転させて、順に「2」、「3」、「4」の位置に合わせて吸引する。

- 7) 接続チューブを内視鏡の吸引器からはずし、吸引器につながるチューブをフタ中心部の突起部からはずす。
- 8) 矢印を番号のついていない位置に合わせる。
- 9) 施設のガイドライン等に従って検体を処理する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

・本品のチューブと内視鏡の吸引口金との接続および吸引器のチューブと本品の吸引口の接続を確実にすること [十分な吸引ができないおそれや、切除したポリープを遺失するおそれがある]。

### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 

水濡れに注意し、高温多湿・直射日光を避けて清潔な場所に保管する。
2. 有効期間
 

外装に記載の通り(自己認証による)。

### 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 ステリスジャパン株式会社  
電話 03-5210-1521
2. 外国製造業者 U. S. Endoscopy Group Inc.  
ユーエスエンドスコーピーグループ インク  
(アメリカ)