

機械器具 32 医療用吸引器
一般医療機器 吸引器用キャニスタ（JMDN：34858000）

再使用禁止

クイックキャッチ ポリープ回収用トラップ-STE

【禁忌・禁止】

1. 使用方法
 - 1) 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状
 - 1) 本体



2. 寸法
 - ・接続チューブ：127mm
 - ・回収容器直径：φ1.35mm

3. 原理

内視鏡の吸引口金と吸引器の間に接続し、吸引により経内視鏡的に回収された組織を一時保管できる。


【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡の吸引口と吸引器の間に接続し、吸引により経内視鏡的に回収された組織を一時保管するために用いる。


【使用方法等】

<操作手順（例）>

- 1) 本品をパッケージから取り出し、吸引器につながるチューブを回収容器の突起部に接続する（図 1）。
- 2) 本品の接続チューブを内視鏡の吸引口金にしっかりと接続する（図 1）

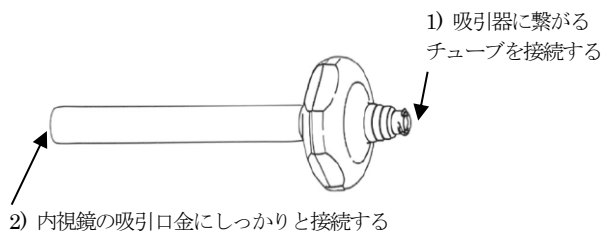

- 3) 内視鏡の吸引器で吸引し、切除したポリープを回収する。
- 4) ポリープの回収が終わったら、接続チューブを内視鏡の吸引器から外し、吸引器につながるチューブを回収容器の突起部から外す。
- 5) 吸引器に繋がるチューブを内視鏡の吸引器に再び取り付ける。
- 6) 回収容器をひねり、フィルタを分離する（図 2）。

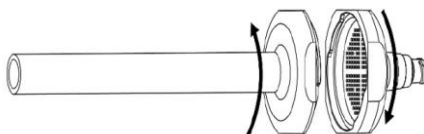

- 7) 施設のガイドライン等に従って検体を処理する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- ・本品のチューブと内視鏡の吸引口金との接続および吸引器のチューブと本品の吸引口の接続を確実にすること [十分な吸引ができないおそれや、切除したポリープを遺失するおそれがある]。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、高温多湿・直射日光を避けて清潔な場所に保管する。
2. 有効期間

外装に記載の通り（自己認証による）。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 ステリスジャパン株式会社
電話 03-5210-1521
2. 外国製造業者 U. S. Endoscopy Group Inc.
ユーエスエンドスコーピーグループ インク
(アメリカ)