

機械器具 32 医療用吸引器  
一般医療機器 吸引器用キャニスタ (JMDN: 34858000)

## 再使用禁止

## バリーンポリープ回収用トラップ-STE

## 【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】

1. 形状
- 1) 本体



2. 寸法

・回収ネット直径:  $\phi 92.1\text{mm}$

3. 原理

内視鏡の吸引口金に吸引チューブを介して取り付け、吸引により経内視鏡的に回収された組織を一時保管する。

## 【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡の吸引口金に吸引チューブを介して取り付け、吸引により経内視鏡的に切除されたポリープの回収のため、吸引器とともに使用する。

## 【使用方法等】

<操作手順 (例)>

- 1) 本品の細長い先端部を抵抗があるまで吸引器に繋がるチューブへ挿入する (図 1)。
- 2) 吸引チューブの先端からはみ出ている余分な回収ネットはチューブの外側へ折り返す (図 2)。

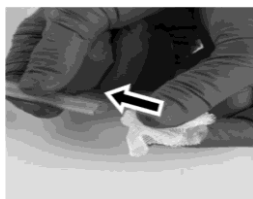


図 1

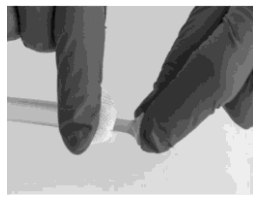


図 2

- 3) 回収ネットを吸引チューブに残すようにアプリケーションのフランジ端を掴んで取り除く (図 3)。
- 4) 回収ネットを取り付けた吸引チューブを内視鏡の吸引口金に取り付ける (図 4)。

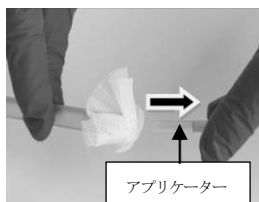


図 3



図 4

- 5) 回収ネットを押さえながら、内視鏡から吸引チューブを取り外す (図 5)。



図 5

- 6) 吸引チューブからはみ出ている回収ネット全体を掴み、吸引チューブから抜き取る。
- 7) 吸引チューブを内視鏡の吸引口金に再び取り付け。
- 8) 回収ネットを慎重に開いて検体が回収されたことを確認する。
- 9) 施設のガイドライン等に従って検体処理する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

・2mm 以下のポリープは吸引しないこと [回収ネットを通り抜けてしまう可能性があるため]。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、高温多湿・直射日光を避けて清潔な場所に保管する。
2. 有効期間  
外装に記載の通り (自己認証による)。

## 【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 ステリスジャパン株式会社  
電話 03-5210-1521
2. 外国製造業者 U. S. Endoscopy Group Inc.  
ユーエスエンドスコーピーグループ インク  
(アメリカ)