

機械器具 15 舌圧子
舌圧子 JMDN コード: 14066000

一般医療機器 Tyto 舌圧子ブレード(TytoPro 用)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 乳幼児の手の届かないところに保管すること。また、子供だけの使用をさせないこと [窒息や傷害に至る可能性がある]
- 再使用禁止

- 製品にひび等の破損や鋭い角がある場合には使用しないこと。
- 本品に対して、曲げる・落とす等の強い衝撃を与えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

温度範囲: -20 - 60℃

湿度範囲: 15 - 70%(結露なきこと)

【形状・構造及び原理等】

<構成、外観>

本品は、舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる舌圧子である。

接続部をもち、他のデバイスと接続して使用することもできる。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社アルム

TEL: 03-4361-2650

外観・形状

大人用舌圧子 (L8)



全長: 78 mm

子供用舌圧子 (L6)



全長: 59 mm

原材料: アクリル樹脂 / ABS 樹脂

【使用目的又は効果】

本品は舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にするために用いる。

【使用方法等】

- 検査対象者に応じて適切なブレードを選択する。成人用のブレードには「L8」のマークが、子供用のブレードには「L6」のマークが付いている。
- 使用する前に、70%イソプロピルアルコール又は70%エチルアルコールで湿らせた布又はパッドを用いて、舌圧子ブレードを拭き、消毒する。消毒後は少なくとも2分間、風乾させること。
- 本品を別売りの Tyto 機器と接続して使用する場合には、舌圧子ホルダーも同様に消毒すること。
- 本品を用いて舌を押さえる。

【使用上の注意】

- 本添付文書に加え、取扱説明書をよく読み、本品の原理、使用方法、注意事項等を理解したうえで本品を使用すること。
- 研磨剤入りの消毒液や、70%イソプロピルアルコール / 70%エチルアルコール以外の消毒液を使用しないこと。[本品が破損するおそれがある]

取扱説明書を必ずご参照ください。