

機械器具(1)手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDN 70469000

アンクル ディストラクター フット ストラップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

***【形状・構造及び原理等】**

*形状: アンクル ディストラクター フットストラップ



*原材料: ・ストラップ: ナイロン
・ポリエチレン フォーム: 架橋発泡ポリエチレン
・スナップ フック: ナイロン


原理: 本品は、足関節専用に設計された固定用ストラップである。別売りの「アンクル ディストラクター」に取付けて患者の下肢を支持する。

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリである。

【使用方法等】

本品は滅菌品である。使用前には必ず包装に傷、破れ等が無いことを確認すること。
使用直前に無菌的に取り出し、足関節に通した本品をマルチモード アンクル ディストラクターのクリップに接続し使用すること(以下の図参照)。

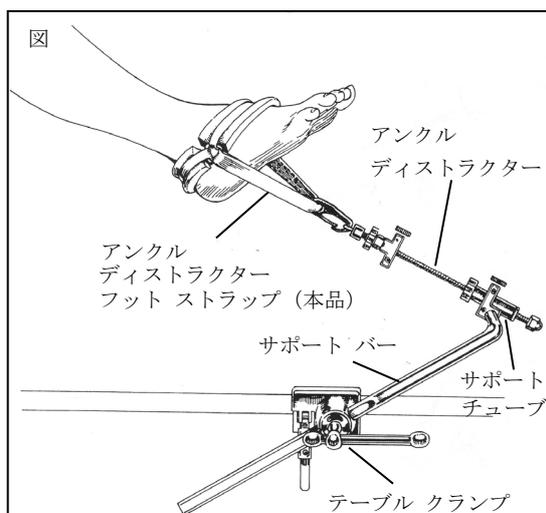

***【使用上の注意】**

1. 重要な基本的注意

- (1) 専門医の監視下でのみ使用すること。
- (2) 本品は滅菌済製品であり、開封は使用直前に包装が破損していないか確認を行うと同時に、無菌的に取り扱うこと。破損がある場合は使用しないこと。
- (3) 本品はディスポーザブルのため一症例限りの使用で再滅菌・再使用はしないこと。
- (4) 開封後未使用のものを再滅菌して使用しないこと。使用しなかった場合でも廃棄すること。
- (5) 使用前に滅菌包装に記載されている滅菌期限を必ず確認すること。
- (6) 使用前に、破損・変形が無いか、また適切に機能するかどうかを確認すること。破損等が確認された場合は使用しないこと。
- (7) 【使用目的又は効果】欄の記載内容以外の用途で使用しないこと。
- (8) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時には必要以上の力を加えないこと。

***2. 不具合・有害事象**

以下の不具合・有害事象が発現する可能性がある。

- * (1) 重大な不具合
・ 製品の破損
- * (2) 重大な有害事象
・ 筋組織・靭帯の損傷

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。
- ・ 滅菌保証期限は外箱に表示してある。(自己認証による)

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

スミス・アンド・ネフュー株式会社
電話番号: 03-5403-8671